

The logo for VelaPort, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are overlaid on a graphic of vertical bars of varying heights and shades of blue, resembling a stylized wave or a bar chart. A small "TM" trademark symbol is located to the right of the logo.

VelaPort™



CUIDADO DE OSTOMÍA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



VelaPort™

The logo features the word "VelaPort" in a bold, blue, sans-serif font with a white outline. The text is centered over a grid of vertical bars in various shades of blue, ranging from light to dark. A small "TM" trademark symbol is positioned to the right of the grid. The background is a light blue gradient with a pattern of small dots at the top and bottom.

ÍNDICE

CONCEPTOS DE OSTOMÍA	3
-----------------------------------	----------

SISTEMAS DE UNA PIEZA

PEDIATRICO	6
SISTEMAS DRENABLES	7
SISTEMAS CERRADOS	8
UROSTOMÍA	9

SISTEMAS DE DOS PIEZAS

CÓMO FUNCIONAN LOS NÚMEROS DE PRODUCTO	11
PLACAS	12
BOLSAS	13

ACCESORIOS

ACCESORIOS	14
------------------	-----------

CONTACTO	17
-----------------------	-----------

CONCEPTOS DE OSTOMÍA

Ostomía: Una abertura quirúrgica del abdomen creada para desviar los desechos corporales. Trata ciertas enfermedades de los sistemas digestivos. Puede ser permanente cuando un órgano debe ser removido.

Colostomía: Una ostomía creada en el intestino grueso o el colon. Es un procedimiento quirúrgico que saca un extremo del intestino grueso a través de la pared abdominal. Durante este procedimiento, un extremo del colon se desvía a través de una incisión en la pared abdominal para crear un estoma.

Ileostomía: Es un estoma construido al llevar el extremo o lazo del intestino delgado (el íleon) a la superficie de la piel.

Urostomía: Un estoma (apertura artificial) creado para desviar la orina, la orina se hace pasar fuera del cuerpo a través de una apertura en el abdomen.

Dispositivo: Es un dispositivo o conjunto de dispositivos utilizados para recoger los residuos originados de la abertura del estoma.

Bolsa: Dispositivo médico protésico plástico flexible que proporciona un medio para la recolección de residuos de un sistema biológico desviado quirúrgicamente a través de un estoma.

Sistema de una sola pieza: Es un sistema donde la bolsa y la placa están fusionadas. El sistema de una sola pieza se llama VELA-UNITY en la línea de ostomía VELAPORT.

Sistema de dos piezas: Se divide en dos secciones, una parte que se adhiere a la piel (placa o base adhesiva) y una parte que recoge los residuos (bolsa). Estas dos partes se acoplan y desacoplan según sea necesario. La limpieza o eliminación de residuos se realiza sin separar la parte adherida de la piel. El sistema de dos piezas se llama VELA-HARMONY en la línea de Ostomía VELAPORT.

Placa: Es la base adhesiva en un sistema de dos piezas que se adhiere a la piel alrededor del estoma con un anillo que permite acoplar una bolsa a él. Pueden ser planos o convexos.

Bolsa drenable: Una bolsa que tiene una abertura para la recepción de los residuos y otra abertura para drenar los residuos recolectados, esto a menudo se llama un sistema abierto. Una bolsa drenable debe ser desechada y reemplazada por una nueva cada tres a cuatro días.

Bolsa de extremo cerrado: Esta es una bolsa que tiene una sola abertura para recolectar los residuos y no es posible drenar. Después de que se llene debe desechar la bolsa.

Accesorios: Productos diseñados específicamente para aliviar los problemas a los que se enfrentan los ostomatizados durante sus rutinas de cuidado del estoma, como fugas, dolor de piel y dificultad con retiro de la bolsa. Productos como pasta de estoma, removedor de adhesivo médico y extensores de anillo.

Filtro: Por lo general, un dispositivo de material de carbono utilizado para absorber los olores provenientes de los residuos. Los filtros también están diseñados a menudo para reducir la creación de inflado de bolsas y las fugas.

Cierre: Esto se refiere a la parte de una bolsa de ostomía drenable que la mantiene sellada hasta que esté lista para ser vaciada. Los cierres de Velaport pueden ser un clip o VELASAFE (gancho y bucle) dependiendo del estilo de la bolsa.

Broche: Por lo general, un dispositivo de plástico utilizado para sujetar la abertura de una bolsa drenable para mantenerla cerrada. Se puede abrir y cerrar repetidamente. Es un cierre de plástico entrelazado que crea un cierre seguro.

VELASAFE®: Nuestro sistema de cierre de bolsa patentado que le permite enrollar el extremo abierto de una bolsa y sellarlo de forma segura sin un clip.

Anillo: Una cresta de plástico en la placa y la bolsa que se unen entre sí para sujetar ambas piezas. Corte para ajustar: Un sistema que permite cortar una abertura de una bolsa u placa a un tamaño específico para adaptarse al diámetro del estoma. Si el estoma no es redondo o sigue cambiando de tamaño (después de cirugía), un anillo con corte a la medida es la mejor opción.

Barrera: Un accesorio versátil y amigable con la piel que se puede utilizar en la parte superior o debajo del aparato para mayor seguridad. Gran opción para personas con alergias a la cinta.

Uso extendido: Productos de ostomía diseñados para tener un tiempo de USO más largo de lo normal que los productos de USO estándar debido a la formulación especial de hidrocoloide.

Absorción: La capacidad de la barrera para absorber líquidos de la piel o fugas del estoma.

SISTEMAS DE UNA PIEZA

Un sistema de una pieza es aquel en el que la placa y la bolsa se han fusionado durante el proceso de fabricación. Existen diferentes tipos de sistemas de una pieza, como los drenables y los cerrados, para la recogida de heces. Si la recogida es de orina, está indicado un aparato urinario específico.

La parte adhesiva del sistema se compone de un material conocido como hidrocoloide, el cual es suave para la piel y puede utilizarse tanto de manera prolongada como estándar.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE UNA PIEZA:

- Una sola pieza para aplicar.
- Facilidad de aplicación para quienes tienen limitaciones de destreza manual.
- Perfil bajo y delgado, por lo que es menos visible.
- Mayor comodidad, ya que no hay anillo.
- Más económico que el sistema de dos piezas.



SISTEMAS DE UNA PIEZA

USO PEDIÁTRICO

BOLSA DE 6" (152 mm) DE LARGO, RECORTABLE PARA AJUSTAR.

CIERRE DE PINZA

Se trata de una solución sencilla y segura para el cierre de bolsas de ostomía. Con una pinza fácil de usar garantiza un cierre hermético, evitando aperturas accidentales. Versátil y cómodo, está diseñado para un cuidado de la ostomía sin complicaciones en una sola pieza.

**TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT
BLANCO / TRANSPARENTE**

SIN FILTRO: IP-CLIP-WPED

CON FILTRO: IP-CLIP-WPED-F


COLOR PIEL

SIN FILTRO: IP-CLIP-SPED

CON FILTRO: IP-CLIP-SPED-F



Pinza con bloqueo de cierre

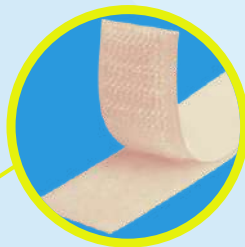

Cierre confiable "sin pinza" con cierre de velcro seguro.

CIERRE VELASAFE®

Velasafe® redefine el cuidado de la ostomía con un cierre enrollable y sin clips que se sujeta mediante un cierre autoadherente. Este innovador diseño garantiza un ajuste cómodo y seguro, simplificando el proceso de cierre para una experiencia sin preocupaciones..

**TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT
BLANCO / TRANSPARENTE**

SIN FILTRO: IP-VEL-WPED

CON FILTRO: IP-VEL-WPED-F

COLOR PIEL

SIN FILTRO: IP-VEL-SPED

CON FILTRO: IP-VEL-SPED-F


SISTEMAS DE UNA PIEZA

USO ADULTO

BOLSA DE 12" (305 mm) DE LARGO, RECORTABLE PARA AJUSTAR.

CIERRE DE PINZA

USO REGULAR

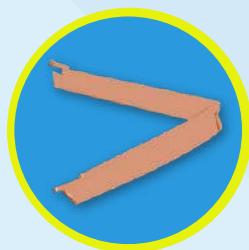

Pinza con bloqueo de cierre

COLOR PIEL

SIN FILTRO: PART # 1P-CLIP-S

CON FILTRO: PART # 1P-CLIP-S-F

TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT BLANCO / TRANSPARENTE

SIN FILTRO: PART # 1P-CLIP-W

CON FILTRO: PART # 1P-CLIP-W-F

USO EXTENDIDO

- Mejor resistencia a los líquidos a través de una absorción mejorada.
- Mejora adherencia.
- En general, tiempo de uso más largo.

COLOR PIEL

SIN FILTRO: PART# 1P-CLIP-SE

CON FILTRO: PART# 1P-CLIP-S-FE

TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT BLANCO / TRANSPARENTE

SIN FILTRO: PART# 1P-CLIP-WE

CON FILTRO: PART# 1P-CLIP-W-FE

CIERRE VELASAFE®

USO REGULAR



Cierre confiable "sin pinza" con cierre de velcro seguro.

COLOR PIEL

SIN FILTRO: PART# 1P-VEL-S

CON FILTRO: PART# 1P-VEL-S-F

TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT BLANCO / TRANSPARENTE

SIN FILTRO: PART# 1P-VEL-W

CON FILTRO: PART# 1P-VEL-W-F

USO EXTENDIDO

- Mejor resistencia a los líquidos a través de una absorción mejorada.
- Mejora adherencia.
- En general, tiempo de uso más largo.

COLOR PIEL

SIN FILTRO: PART# 1P-VEL-SE

CON FILTRO: PART# 1P-VEL-S-FE

TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT BLANCO / TRANSPARENTE

SIN FILTRO: PART# 1P-VEL-WE

CON FILTRO: PART# 1P-VEL-W-FE

SISTEMAS DE UNA PIEZA

USO ADULTO

BOLSA DE 8" (203 mm) DE LARGO, RECORTABLE PARA AJUSTAR.

La placa **base adhesiva** se adhiere firmemente a la piel que rodea el estoma, **garantizando un sellado fiable**. La bolsa colectora se conecta a la placa base y se emplea para recoger los residuos corporales que se vierten a través del estoma.



COLOR PIEL

SIN FILTRO: IP-CLOSED-S

CON FILTRO: IP-CLOSED-S-F



TRANSPARENTE CON PANEL

DE COMFORT BLANCO / TRANSPARENTE

SIN FILTRO: IP-CLOSED-W

CON FILTRO: IP-CLOSED-W-F

Con nuestras bolsas VelaPort, nos dedicamos a mantener la limpieza de su sistema al tiempo que le **garantizamos comodidad**.

CONTÁCTENOS: ☎ +1 (407) 788 - 5300 ✉ info@alternativeexports.com

SISTEMAS DE UNA PIEZA

UROSTOMIA ADULTO

BOLSA DE 9" (228 mm) DE LARGO ADULTO, CON TAPA SIN FILTRO.

USO REGULAR



**TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT
BLANCO / TRANSPARENTE
SIN FILTRO: IPU-CLIP-W
CON FILTRO: IPU-CLIP-W-F**

**COLOR PIEL
SIN FILTRO: IPU-CLIP-S
CON FILTRO: IPU-CLIP-S-F**

USO EXTENDIDO



**TRANSPARENTE CON PANEL DE COMFORT
BLANCO / TRANSPARENTE
SIN FILTRO: IPU-CLIP-WEXT
CON FILTRO: IPU-CLIP-WEXT-F**

**COLOR PIEL
SIN FILTRO: IPU-CLIP-SEXT
CON FILTRO: IPU-CLIP-SEXT-F**



Todos nuestros productos se **fabrican exclusivamente** en los Estados Unidos de América.

SISTEMAS DE DOS PIEZAS


Un **sistema de 2 piezas** es aquel en el que la placa y la bolsa están separadas y deben ser conectadas entre sí por el ostomizado. Hay diferentes tipos de placas y bolsas disponibles. Las placas pueden ser de **uso regular** o de **uso extendido**. Las bolsas utilizadas para un sistema de 2 piezas pueden ser **drenables** o **cerradas**.

VENTAJAS DE UN SISTEMA DE 2 PIEZAS:

- Permite un fácil acceso al estoma para su inspección.
- Reduce el tiempo para cambiar de bolsa
- Estoma protegido por anillo
- Capacidad para usar diferentes bolsas de la marca



Anillo de acoplamiento de placa o barrera

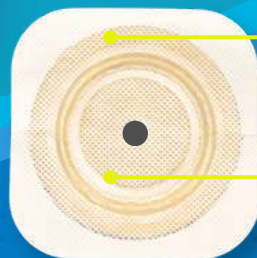

Barrera que se adhiere a la piel

Orificio de inicio

SISTEMAS DE DOS PIEZAS

CÓMO ENTENDER LOS CODIGOS DE PRODUCTO DE DOS PIEZAS DE VELAPORT:

En los **sistemas de dos piezas** de Velaport, los productos se organizan para que los clientes puedan entender cómo el número de producto se relaciona con el tamaño de la **placa y el anillo**. Los tres dígitos numéricos consecutivos en nuestro número de pieza de producto para los sistemas de dos piezas indican el **tamaño del anillo**.

Al hacer coincidir una bolsa y una placa, **esos tres dígitos deben ser los mismos para ambas partes**. Cuando los tamaños son los mismos, ambas partes se acoplarán perfectamente.

Hay cuatro tamaños diferentes disponibles de anillo:

150 -- 1.50 pulgadas, 38 mm.

175 -- 1,75 pulgadas, 45 mm.

225 -- 2.25 pulgadas, 57 mm.

275 -- 2.75 pulgadas, 70 mm.

Ejemplo de piezas coincidentes:

W175 Una placa de 1.75", que necesita ser utilizada con bolsa de 1.75" como 2P-CLIP-175S.



SISTEMAS DE DOS PIEZAS

PLACAS 4" X 4"

CORTADO A MEDIDA, COLOR PIEL CON COLLAR

USO REGULAR

TAMAÑO DEL ANILLO

1x2" (38 mm) PARTE: W150

1 3/4" (45 mm) PARTE: W175

2 1/4" (57 mm) PARTE: W225

2 3/4" (70 mm) PARTE: W275

USO EXTENDIDO

TAMAÑO DEL ANILLO

1 1/2" (38 mm) PARTE: W150EXT

1 3/4" (45 mm) PARTE: W175EXT


2 1/4" (57 mm) PARTE: W225EXT

2 3/4" (70 mm) PARTE: W275EXT



PLACAS 5" X 5"

CORTADO A MEDIDA, COLOR PIEL CON COLLAR

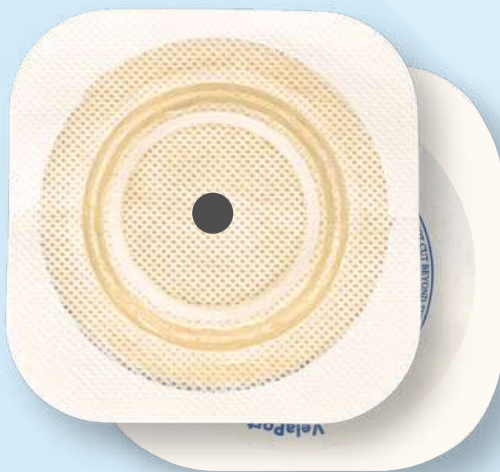

USO REGULAR

TAMAÑO DEL ANILLO

1 x2" (38 mm) PARTE: W150-5

1 3/4" (45 mm) PARTE: W175-5

2 1/4" (57 mm) PARTE: W225-5

2 3/4" (70 mm) PARTE: W275-5

USO EXTENDIDO

TAMAÑO DEL ANILLO

1 1/2" (38 mm) PARTE: W150EXT-5

1 1/2" (45 mm) PARTE: W175EXT-5

1 1/2" (57 mm) PARTE: W225EXT-5

1 1/2" (70 mm) PARTE: W275EXT-5

SISTEMAS DE DOS PIEZAS

ADULT

CIERRE VELA-UNITY DE 12"
(304 mm) CON O SIN FILTRO




TAMAÑO DEL ANILLO

1 1/2" (38 mm) PARTE #: 2P - CLIP -150S - F
1 3/4" (45 mm) PARTE #: 2P - CLIP -175S - F
2 1/4" (57 mm) PARTE #: 2P - CLIP -225S - F
2 3/4" (70 mm) PARTE #: 2P - CLIP -275S - F

ADULT

8" (203 mm) CON FILTRO

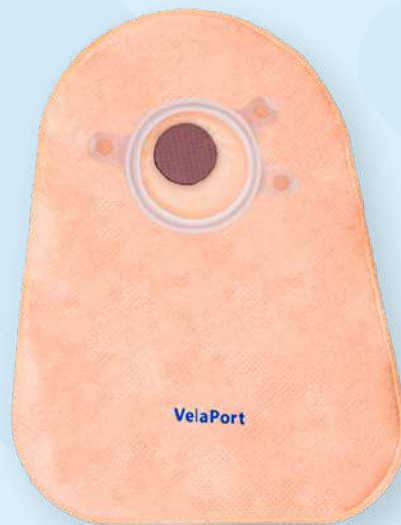

TAMAÑO DEL ANILLO

1 1/2" (38 mm) PART #: 2P - CLOSED -150S - F
1 3/4" (45 mm) PART #: 2P - CLOSED -175S - F
2 1/4" (57 mm) PART #: 2P - CLOSED -225S - F
2 3/4" (70 mm) PART #: 2P - CLOSED -275S - F

Los productos de **ostomía VelaPort** ofrecen a los distribuidores y usuarios finales productos de **calidad a un precio económico**.

CONTÁCTENOS: ☎ (407) 788 - 5300 ✉ info@alternativeexports.com

ACCESORIOS VELAPORT

Hay muchos accesorios que pueden **mejorar y proporcionar mejores resultados**. Hay productos que pueden ayudar a mantener una **piel saludable** y adicionalmente algunas ayudan a construir una base para asegurar una **buena adherencia y reducir las fugas**.



Cuidado para tu piel

Mantente fresco

Remueve olores



ACCESORIOS VELAPORT

ANILLO BARRERA DE PIEL

BARRERA DE LA PIEL DE VELAPORT FUNCIONA BIEN PARA SELLAR Y PROTEGER LA PIEL ALREDEDOR DEL ESTOMA.

2" (50mm): PARTE#: SBR-2

4": (100mm): PARTE#: SBR-4



1/3 BARRERA MEDIA LUNA

LAS BARRERAS MEDIA LUNA DE VELAPORT SON TIRAS PRE-CORTADAS Y PREFORMADAS QUE AYUDAN A POSICIONAR LA BOLSA Y PROLONGAR SU USO. SON IDEALES PARA PROTEGER LA PIEL SIN IRRITACIÓN, SIENDO UNA OPCIÓN EXCELENTE PARA PERSONAS ALÉRGICAS A LA CINTA ADHESIVA.

CAJA DE 30: PART#: CRES-13

PASTA

LA PASTA DE VELAPORT AUMENTA LA BARRERA DE LA PIEL Y EL TIEMPO DE USO GENERAL. LA PASTA VELAPORT PROPORCIONA UNA SUPERFICIE PLANA QUE AYUDA A PREVENIR FUGAS DEBAJO DEL APARATO DE OSTOMÍA.

REGULAR: PARTE #: PASTE-2

CONTIENE ALCOHOL PARA UN TIEMPO DE SECADO MÁS RÁPIDO.

SIN OLOR: PARTE #: PASTE-2-NS

FÓRMULA SIN ALCOHOL PARA PIELS IRRITADAS O SENSIBLES.



ACCESORIOS VELAPORT

POLVO PARA OSTOMÍA

EL POLVO DE OSTOMÍA DE VELAPORT SE UTILIZA PARA ABSORBER EL EXCESO DE HUMEDAD Y LA PIEL ROTA E IRRITADA ALREDEDOR DEL ESTOMA.

BOTELLA DE UNA ONZA: PARTE#: PWO-1



DESODORANTE LUBRICANTE

AYUDA A PREVENIR QUE LA BOLSA SE COLAPSE (PAREDES DE LA BOLSA PEGADAS JUNTAS). TAMBIÉN FACILITA EL VACIADO DE LA BOLSA Y NEUTRALIZA EL OLOR.

1 OZ PARTE#: LUB-1
8 OZ PARTE#: LUB-8



GOTAS DESODORANTES

DISEÑADAS PARA NEUTRALIZAR OLOR DESDE EL INTERIOR DE LA BOLSA DURANTE HORAS DE PROTECCIÓN

1 OZ PARTE#: DEO-1
4 OZ PARTE#: DEO-4
8 OZ PARTE#: DEO-8



LIMPIADOR DE DISPOSITIVO

EFICAZMENTE DESODORIZA Y LIMPIA BOLSAS DE OSTOMÍA Y ACCESORIOS. ESTE PRODUCTO AYUDA EN LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS APARATOS DE OSTOMÍA.

BOTELLA DE 16 OZ: PARTE#: CLEAN-16



FORMAS DE CONTACTO

Worldwide Supply and Export Inc.
dba Alternative Exports, Inc.
2721 Pemberton Dr. Apopka, FL 32703 USA

Tel: (407) 788 - 5300
Fax: (407) 788 - 5373

Email: info@alternativeexports.com
www.AlternativeExports.com



Made in USA

Marjim Enterprises S. de R.L. de C.V.

Calle Tuxpan No. 63 Int. 404, Colonia Roma Roma Sur, C.P. 06760,
Cuautemoc, Ciudad de México, México.

VelaPort Ostomy System, Reg. San. 2062C2023 SSA

MK-AE-09
R-01
20/02/24

Aviso de publicidad No. 2409152002C00084

